

MOBIDERM

Aktiverer og stimulerer
lymfødemet i løbet af natten



NYHED
Løssalg af
pelletter til BH
Side 4

Har du dårlig blodcirkulation i ben, arme eller andre steder?

Så er der risiko for både blodpropper og lymfødemer. Mobiderms produkter benytter sig af en kompressionsteknik der reducerer lymfødem.

Lymfødem er en kronisk lidelse, der opstår, fordi funktionen i lymfesystemet er nedsat. Lymfødem viser sig som en vedvarende hævelse af især arme og/eller ben, men kan også være andre steder på kroppen; for eksempel omkring brystet i forbindelse med brystkræftoperation.

Lymfødembehandling består af to faser: Den initiale fase, som stræber efter at reducere lymfødemet så meget som muligt, og vedligeholdelsesfasen, som har til formål at bibeholde resultatet ved hjælp af medicinske kompressionsstrømper*.

Måltrettet behandling med mikromassage

Mobiderm er et struktureret materiale bestående af små kuber, indlejret i et let elastisk materiale. Det unikke og patenterede ved Mobiderm er, at kuberne er placeret forskelligt – nogle peger opad, andre nedad, og nogle er drejet i forskellige retninger. Dette skaber varierende tryk på vævet, hvilket påvirker lymfødemet på flere måder.

Den uregelmæssige placering af kuberne skaber en effektiv mikromassage, hvor lymfevæsken under områder med højere tryk skubbes videre til områder med lavere tryk. Denne mobilisering aktiverer lymfesystemets kollektorer og sætter gang i hele systemet.

Mobiderm hjælper med at kontrollere lymfødem og samtidig bearbejde og løsne fibrøst væv. Flere studier* viser, at brugere, som anvender Mobiderm om natten, modvirker tilbagevendende hævelse – et almindeligt problem ved lymfødem.


Anvendes om natten

Behandlingen sker, mens du sover. Mobiderm er nemlig designet til brug under hvile eller om natten. Du vågner udhvilet og har lettere ved at tage dine medicinske kompressionsstrømper på til brug i dagtimerne.

Fås i plader og ruller

Mobiderm fås i flere forskellige udformninger. Dels på rulle og plade for applicering i kombination med bandagering under den initiale fase og dels som arm- og benstrømper, BH og shorts i en kombination af standard og specialsyede modeller til anvendelse i vedligeholdelsesfasen.

Tal med din behandler fra Sahva Ottobock Care omkring hvad der passer bedst til dig.

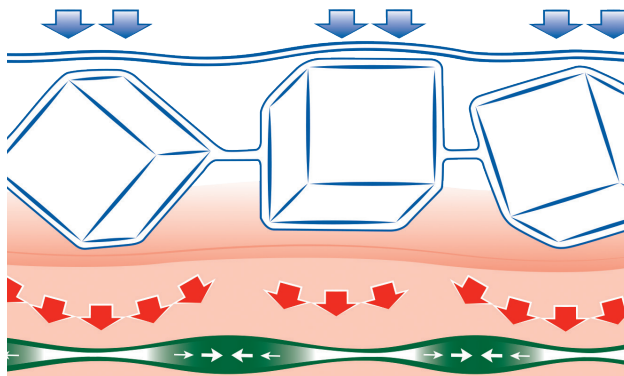


Den varierende konstruktion af materialet stimulerer flowet i dit lymfesystem.

Mobiderm fås i to strukturer:

Store kuber – ideelle til større vævsområder (15x15 mm)

Små kuber – velegnede til mindre vævsområder som håndryg og fodryg (5x5 mm)

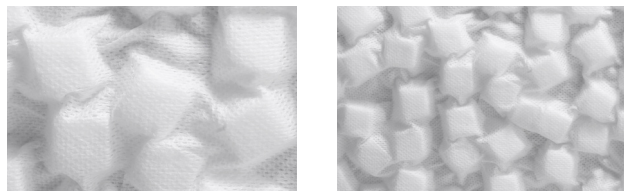

Mobiderm – gennemtestet og nem at anvende

- Et gennemprøvet og klinisk testet materiale, som giver et hurtigt og vedvarende resultat.
- Blødgør fibrøst væv, samt stimulerer og aktiverer lymfesystemet.
- Mobiderm er enkelt at håndtere og meget behageligt at anvende.
- Det aktiverer og stimulerer lymfens gennembløb om natten hos dig der har lymfødem, uanset stadie.
- Et anbefalet supplement til medicinske kompressionsstrømper.
- Mobiderm anvendes under den initiale reduktionsfase og i vedligeholdelsesfasen.

På YouTube findes flere videoer omkring opbygningen og anvendelsen af Mobiderms produkter – søg på Thusane Scandinavia



Mobiderm er anvendt i flere kliniske studier. I MARILYN-studiet* blev det tydeligt vist, at lymfødemet mindskede i volumen, fra den initiale reduktionsfase blev stabiliseret, og reduktionen blev opretholdt ved brug af Mobiderm om natten. Uden Mobiderm øgede volumen allerede fra dag 1 i vedligeholdelsesfasen.

* 2017, An auto-adjustable night garment to control early rebound effect of edema volume after intensive phase of Decongestive Lymphedema Therapy (DLT). Mestre S.^{1,2}, MD, MSc, Gaillard G.¹, MD, Benhamou M.¹, MD, Soulier-Sotto V.¹, MD, Nou M.¹, MD, Pasqualini M.³, PhD, Ben Amor C.³, MD, Quere I.^{1,2,4}, MD, PhD.

Indhold	
Behandling med mikromassage	2
Mobiderm Intimate Shorts	4
Mobiderm Intimate BH	6
Mobiderm Autofit	8
Størrelsestabeller og produktoversigt	10
Aktiv polstring	12
BiFlex Self Adjust	14
Komplette kits	15



*POLIT study (2014), Marilyn study (2017), Mobinight study (2017).

MOBIDERM INTIMATE SHORTS

Mobiliserer og aktiverer lymfødemed i genitallområdet.
Med Mobiderm Intimate Shorts er udviklet specifikt til dig med hævelse i lyskeområdet – hvilket bl.a. kan opstå efter endt kræftbehandling.

Mobiderm Intimate Shorts er udviklet sammen med sundhedspersonale og brugerne for at imødekomme alle tænkelige krav og ønsker. Resultatet er et produkt med en løs/udtagelig pelotte med Mobidermstrukturer i et diskret design.

Kompressionen i materialet er vel gennemtænkt med et graderet tryk, der modsvare 15-20 mmHg rundt om bækkenområdet, hvor pelotten også er placeret. Ved benafslutningen er kompressionen kun ca. 5 mmHg, hvilket gør at shortsene med fordel kan kombineres med overlappende medicinske kompressionsstrømper (lår/lyske strømper). Da det er funktionen fra Mobidermstrukturen som aktiverer lymfetransporten er kompressionsgraden fuldt tilstrækkelig for at opnå en effekt.

Mobiderm Intimate Shorts har pelotter med Mobidermstruktur (se s. 2) som kan tages ud og vaskes separat. Disse pelotter er forskellige i udformningen alt efter om det er til kvinder eller mænd, for at sikre en god pasform og effekt.

Sammen med tre behandlingscentre i Frankrig har producenten Thusane også gennemført et medicinsk studie med Mobiderm Intimate Shorts. Studiet viser ekstremt positive resultater og blev præsenteret i 2022 ved 46th European Society of Lymphology Congress.

- **Færdig løsning** til kvinder og mænd med ødem i genitallområdet.
- **Kan kombineres med lår/lyskestrømper** ved behov for behandling af hele dit ben.
- **Specielt udformede pelotter** med Mobidermstruktur med forskelligt design til mænd og kvinder.
- **Anvendes dag og nat** afhængig af behov.
- **Den patenterede struktur** stimulerer og aktiverer lymfesystemet.

Art nr. 373601
Mobiderm Intimate Shorts til kvinder

Art nr. 373701
Mobiderm Intimate Shorts til mænd

Materialesammensætning:
Polyamid, elastan, polyester, polyuretanskum.
Se detaljeret information på vaskemærket.

Vaskes i maskine ved maksimalt 40 grader.
Holdbarhed på 6 måneder.

 På YouTube findes flere videoer om Mobiderm Intimate Shorts (søg på Thusane Scandinavia).

Mobiderm Intimate Shorts

	Omfangsmål	
	cG	cK
1	45 - 54	88 - 94
2	48 - 58	95 - 101
3	51 - 62	102 - 108
4	54 - 66	109 - 115
5	57 - 69	116 - 122
6	60 - 72	123 - 129

Alle størrelser findes i både herre- og damevarianten.



Mobiderm Intimate Shorts til kvinder



Pelotte til kvinder



Skålførm pelotte til mænd



Mobiderm Intimate Shorts til mænd



MOBIDERM INTIMATE BH

Kompressions-BH som mobiliserer og aktiverer postoperative og kroniske ødemer i brystområdet. Mobiderm Intimate BH er en optimal løsning til dig som har brystrelateret ødem.

2-3 ud af 10 kvinder risikerer at udvikle lymfødem som følge af strålebehandlingen eller kirurgiske indgreb i forbindelse med brystkræft. Uanset om det vedrører total mastektomi eller deloperation kan ødem opstå akut post-operativt eller udvikler sig langt senere som kronisk lymfødem i brystet og/eller brystområdet. Studier viser at mere end 1,5 millioner patienter over hele verden er ramt af brystkræftrelaterede ødemer.

Mobiderm Intimate BH er en kompressions-BH som er specielt udviklet til brug, i den akutte fase efter behandling af din brystkræft samt ved vedvarende og kronisk lymfødem.

Mobiderm Intimate BH har en effektivt kompressiv funktion som sammen med den integrerede pelotte med Mobidermstruktur drænerer og bearbejder ødemet, samt minimerer risikoen for udvikling af hæmatomer (blodansamlinger).

Mobiderm Intimate BH er gennemtæk og udformet med bredde og bløde skulderstropper, højt skåret under armene samt med integrerede sømme som ikke generer. De to medfølgende pelotter med Mobidermstruktur kan tages ud og vaskes separat.

- **Unikt produkt til kvinder** med ødemproblematik i brystområdet.
- **Integrerede lommer** til eksterne brystproteser.
- **Udtagelige pelotter** med Mobidermstruktur.
- **Perfekt afvejet kompression** i kombination med Mobidermstrukturen mobiliserer og aktiverer ødemet.
- **Bredde polstrede** skulderstropper sikrer optimalt lymfeflow og funktion.
- **Flade og bløde** sømme som ikke generer og giver øget komfort ved langvarigt brug.
- **Lynlås på forsiden** gør Mobiderm Intimate BH let at tage af og på.

Art nr. T571301
Mobiderm Intimate BH

Materialesammensætning:
Polyamid, elastan, polyester, polyuretanskum.
Se detaljeret information på vaskemærket.

Vaskes i maskinen ved maksimalt 30 grader.
Holdbarhed på 6 måneder.

Art. nr. T5713512
Pelotte – fås i 5 størrelser (XS–XL)

Sådan vælger du den rette størrelse

Vælg størrelse ud fra omkredsen under brystet (cm):					
	68–77 cm	78–87 cm	88–97 cm	98–107 cm	108–117 cm
BH-størrelse:	70–75	80–85	80–95	100–105	110–115
	XS	S	M	L	XL
Vælg skålstørrelse ved at måle omkredsen rundt om brystet (cm):					
AA / A	80–89	90–99	100–109	112–119	120–129
B / C	84–93	94–103	104–113	116–123	124–133
D / E	88–97	98–107	108–117	120–127	128–137



To pelotter med Mobiderm-struktur medfølger. Kan bestilles separat.



Mobiderm Intimate BH set forfra



Mobiderm Intimate BH set bagfra



MOBIDERM *autofit*


Mobiderm Autofit har justerbar pasform i standard størrelser, hvilket indebærer, at den passer perfekt i den initiale reduktionsfase.

Takket være muligheden for at justere omfanget kan Mobiderm Autofit følge lymfødemets udvikling, når det mindsker i omfang. Dette gør, at Mobiderm Autofit med fordel kan anvendes i den initiale reduktionsfase som alternativ til eller i kombination med bandagering. De patenterede bløde kuber aktiverer lymfesystemet og modvirker risikoen for, at stillestående lymfe kan forårsage fibrose.

Markeringer på materialet muliggør individuel tilpasning af kompressionsniveauet i tre trin (++) Disse kan til og med anvendes til at kontrollere dit ødems variation over tid.

Mobiderm Autofit kan med fordel anvendes i vedligeholdelsesfasen, idet den i mange tilfælde kan erstatte behovet for specialfremstillede produkter. Den justerbare mulighed bevirker også, at niveauet på den aftagende kompression kan reguleres efter behov.

Tal med din behandler fra Sahva Ottobock Care om hvad der passer til dig.

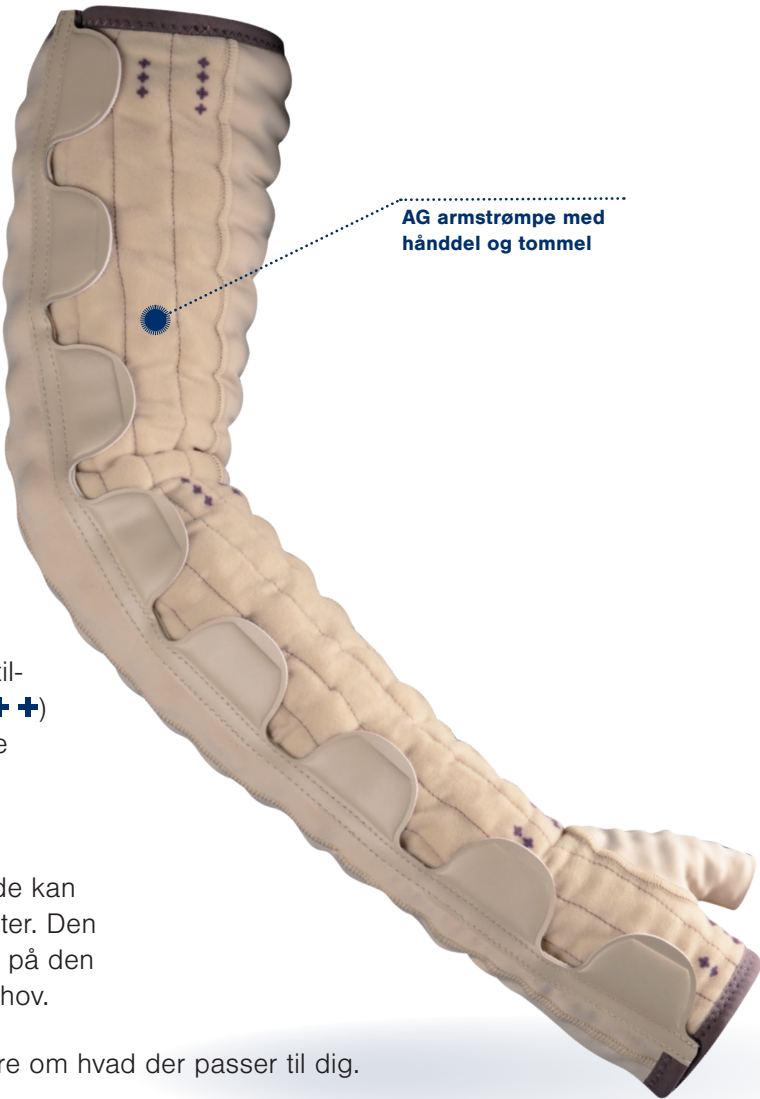

AG armstrømpe med hånddel og tommel



AD knæstrømpe

AG lårstrømpe

Standard



Markerede niveauer: Kompressionen kan justeres helt efter dit behov i takt med, at ødemet mindsker i omfang.

Antiglid-knopper: Forhindrer faldskader, når du går oppe.



Integreret hånddel: Modvirker ødem i hånden. Kan ved behov åbnes, og hånden frigøres.



Åbent design: Letter på- og aftagning



Velcrolukning: Dobbelte rækker på knæ- og lårstrømperne for hurtig og enkel på- og aftagning.

Velcrolukning: Kun én række på armstrømperne for enkel på- og aftagning med én hånd.

Størrelse	Længde ℓ				Længde ℓ	
	Omfang ved cA	Omfang ved cC	Omfang ved cD	Omfang ved cG	Normal ℓ = 40 - 45 cm	Lang ℓ = 45 - 50 cm
AG Armstrømpe – højre						
1	17 - 21	15 - 19	22 - 28	25 - 32	37330220100261	37330220100271
2	17 - 21	16 - 20	24 - 30	29 - 36	37330220200261	37330220200271
3	18 - 22	17 - 21	26 - 32	33 - 40	37330220300261	37330220300271
4	18 - 22	17 - 21	28 - 34	37 - 44	37330220400261	37330220400271
5	19 - 23	18 - 22	30 - 36	41 - 48	37330220500261	37330220500271
6	20 - 24	19 - 23	31 - 37	45 - 52	37330220600261	37330220600271
AG Armstrømpe – venstre						
1	17 - 21	15 - 19	22 - 28	25 - 32	37330220100262	37330220100272
2	17 - 21	16 - 20	24 - 30	29 - 36	37330220200262	37330220200272
3	18 - 22	17 - 21	26 - 32	33 - 40	37330220300262	37330220300272
4	18 - 22	17 - 21	28 - 34	37 - 44	37330220400262	37330220400272
5	19 - 23	18 - 22	30 - 36	41 - 48	37330220500262	37330220500272
6	20 - 24	19 - 23	31 - 37	45 - 52	37330220600262	37330220600272

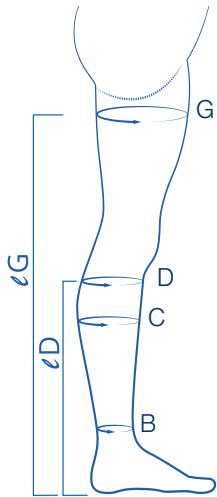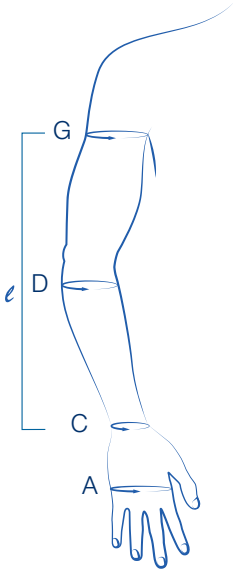


Størrelse	Længde ℓ						
	Omfang ved cB	Omfang ved cC	Omfang ved cD	Kort ℓ D : 38 - 40 cm	Normal ℓ D : 40 - 42 cm	Lang ℓ D : 42 - 44 cm	Ekstra lang ℓ D : 44 - 46 cm
AD Knæstrømpe				Artikelnr.			
1	16-24	24-35	25-36	37340120100231	37340120100232	37340120100233	37340120100234
2	20-28	32-43	32-43	37340120200231	37340120200232	37340120200233	37340120200234
3	24-32	40-51	39-50	37340120300231	37340120300232	37340120300233	37340120300234
4	28-36	48-59	46-57	37340120400231	37340120400232	37340120400233	37340120400234

Størrelse	Længde ℓ						
	Omfang ved cB	Omfang ved cC	Omfang ved cG	Kort ℓ G : 67 - 72 cm	Normal ℓ G : 72 - 77 cm	Lang ℓ G : 77 - 82 cm	Ekstra lang ℓ G : 82 - 87 cm
AG Lårstrømpe				Artikelnr.			
1	16-24	24-35	46-57	37350120100231	37350120100232	37350120100233	37350120100234
2	20-28	32-43	53-65	37350120200231	37350120200232	37350120200233	37350120200234
3	24-32	40-51	61-72	37350120300231	37350120300232	37350120300233	37350120300234
4	28-36	48-59	68-80	37350120400231	37350120400232	37350120400233	37350120400234


Mobiderms størrelsetabeller og produktoversigt

Mobiderm kan anvendes dag og nat (efter behov), og har en effektiv væske-drivende funktion. Foruden et stort antal standardstørrelser er der yderligere mulighed for at specialfremstille Mobiderm nøjagtig efter dine individuelle mål.


Studier viser, at udelukkende brug af medicinske kompressionsstrømper om dagen ofte ikke er tilstrækkeligt for at kontrollere et lymfødem og vedligeholde resultatet fra den initiale reduktionsfase. Ved at aktivere det lymfatiske væv yderligere om natten med Mobiderm, stimuleres lymfekredsløbet, og risikoen for, at lymfødemet øger i omfang, modvirkes effektivt. Det er klinisk bevist – læs mere på thuasne.com/sv

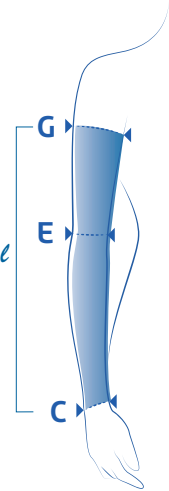

Størrelse	Omfang ved cC	Omfang ved cE	Omfang ved cG	Længde ℓ	
				Normal ℓ = 40 - 45 cm	Lang ℓ = 45 - 50 cm
Artikelnr.					
1	14 - 16	22 - 25	25 - 29	37300220100233	37300220100232
1+	14 - 16	24 - 27	28 - 32	37300240100233	37300240100232
2	16 - 18	25 - 28	29 - 33	37300220200233	37300220200232
2+	16 - 18	27 - 30	31 - 35	37300240200233	37300240200232
3	18 - 20	28 - 31	32 - 36	37300220300233	37300220300232
3+	18 - 20	30 - 33	35 - 39	37300240300233	37300240300232
4	20 - 22	31 - 34	35 - 39	37300220400233	37300220400232
4+	20 - 22	33 - 36	38 - 42	37300240400233	37300240400232
5	22 - 24	34 - 37	38 - 42	37300220500233	37300220500232
5+	22 - 24	36 - 39	41 - 45	37300240600233	37300240500232

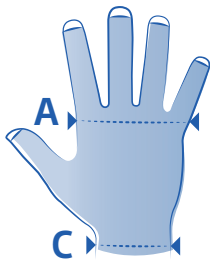


Størrelse	Omfang ved cC	Omfang ved cA	højre hånd		venstre hånd	
			Artikelnr.			
1	14 - 16	15 - 17	37320120100201	37320120100202		
2	16 - 18	17 - 19	37320120200201	37320120200202		
3	17 - 19	19 - 21	37320120300201	37320120300202		
4	19 - 21	21 - 23	37320120400201	37320120400202		
5	20 - 22	23 - 25	37320120500201	37320120500202		
6	21 - 23	25 - 27	37320120600201	37320120600202		

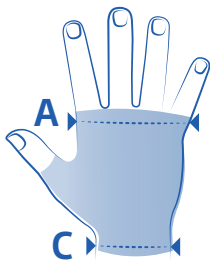


Størrelse			
	Omfang ved cC	Omfang ved cA	højre / venstre hånd
	Artikelnr.		
1	14 - 16	15 - 17	37310120100299
2	16 - 18	17 - 19	37310120200299
3	17 - 19	19 - 21	37310120300299
4	19 - 21	21 - 23	37310120400299
5	20 - 22	23 - 25	37310120500299
6	21 - 23	25 - 27	37310120600299

Mobiderm standardstørrelser

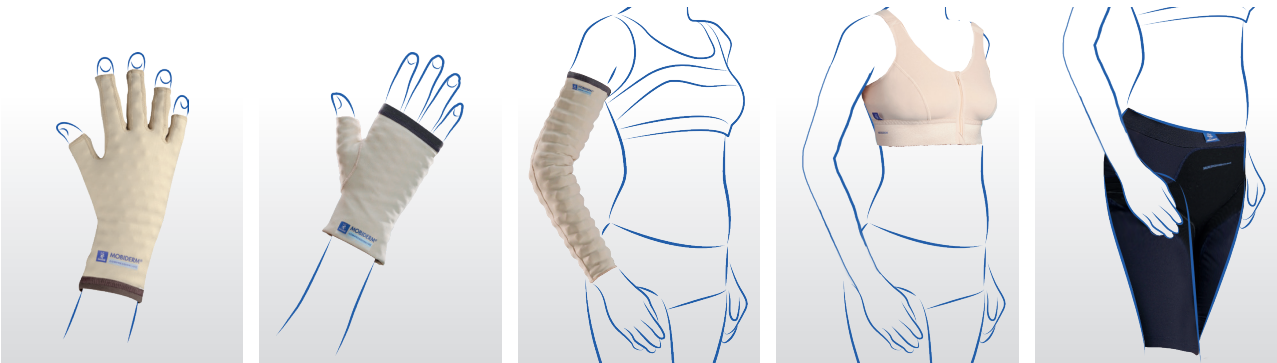


AC1 handske AC1 handske uden fingre CG armstrømpe Intimate BH Intimate Shorts

Mobiderm efter individuelle mål

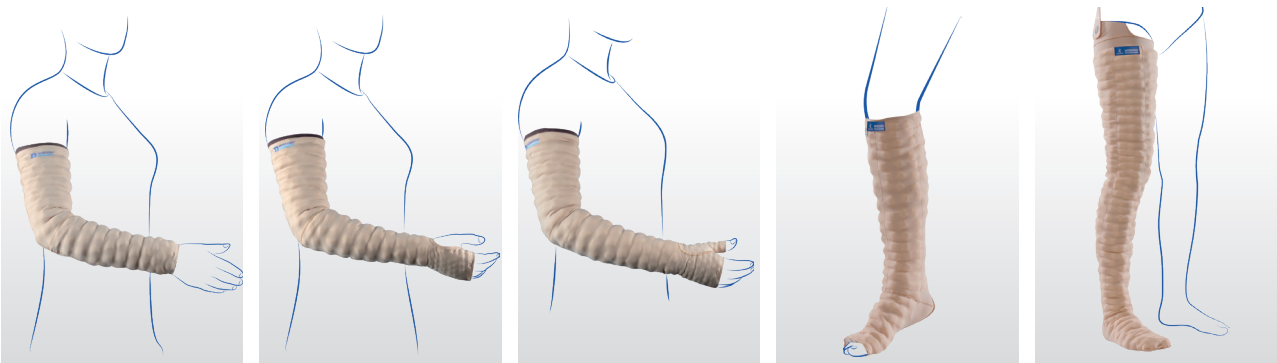

CG armstrømpe AG armstrømpe med hånddel uden tommel AG armstrømpe med hånddel med tommel AD knæstrømpe AG lårstrømpe

Øvrigt sortiment

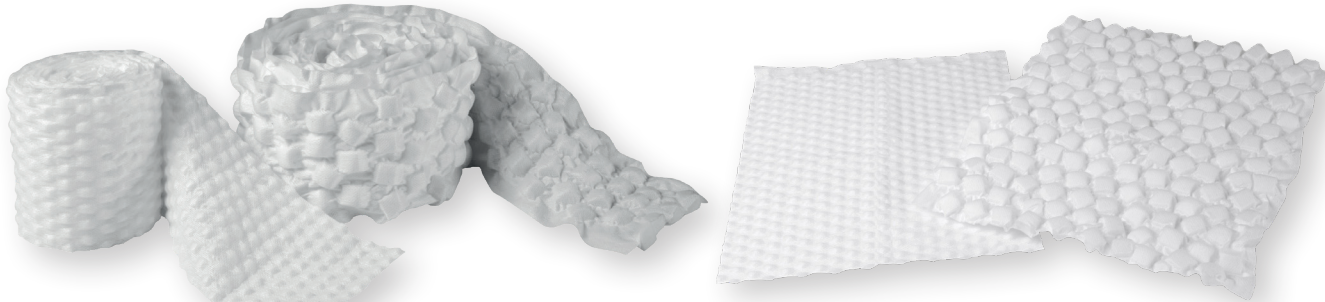

Art nr 37200101030001
Bandage med små kuber 300x10 cm
Art nr 37200101030002
Bandage med store kuber 300x10 cm

Materialesammensætning:
Non-woven. Kuber: polyuretanskum (15x15 mm),
polyethylenskum (5x5 mm).
Se etiketten for detaljerede oplysninger.

Art nr 37100102502501
Ark med små kuber 25x25 cm
Art nr 37100103310001
Ark med små kuber 100x25 cm
Art nr 37100103310002
Ark med store kuber 100x20 cm

Mobiderm på rulle og plader

Det unikke materiale fås yderligere i plader eller ruller. Det kan anvendelse sammen med bandagering i den initiale bandageringsfase. Kan klippes til efter behov.

Venøse bensår heler hurtigere med aktiv polstring

Behandling af venøse bensår er en af de største udfordringer for sundhedsvæsenet i dag. Ud over den store belastning for dig som patient, er behandlingen også meget omkostningstung for samfundet.

Årsager og udfordringer

Venøse bensår skyldes ofte nedsat funktion i dit venesystemet og er ofte forbundet med ødemer og undertiden fibrøst væv. Det er afgørende at reducere ødem og blødgøre fibrøst væv for at opnå et vellykket behandlingsresultat.

Vigtigheden af at reducere ødem

Hvis der er ødem i sårområdet, skal det reduceres mest muligt. Ubehandlet ødem kan føre til inflammation og fibrose, hvilket forværrer din tilstand. Ved at mindske væskemængden i vævet reduceres trykket i venerne, hvilket forbedrer blodgennemstrømningen og mindsker risikoen for yderligere skade.

Når ødemet mindskes, forbedres tilførslen af næring og ilt til det berørte område, hvilket reducerer risikoen for vævshypoksi og vævsdød.

Nye smarte bandager med visuelle guider

Kompressionsbehandling med bandagering er den mest effektive metode til at reducere ødem. Det er vigtigt, at bandagen påføres med tilstrækkeligt tryk og med gradvist aftagende kompression ned langs dit ben. Forkert påføring kan hæmme din blodcirkulation og skabe yderligere problemer.


Bilfex kompressionsbandager har integrerede visuelle guider, der viser både hvor hårdt bandagen skal strammes og hvordan den skal overlappes. Dette sikrer en ensartet behandling – uanset hvem der udfører den – og bidrager til hurtigere heling.

Aktivt polstringsmateriale giver enestående reduktion af ødem

For at kompressionsbandagen skal fungere optimalt, skal dit ben være så cirkulært som muligt. Derfor anvendes polstringsmateriale til at udligne anatomiske variationer.

Mobiderm er et aktivt polstringsmateriale og klinisk testet. Materialet består af en uregelmæssig kubestruktur, som skaber mikromassage (læs mere på s. 2).

Ødem under kuber med højere tryk flyttes til områder med lavere tryk, hvilket stimulerer lymfesystemet og fremskynder reduktionen af dit ødem.

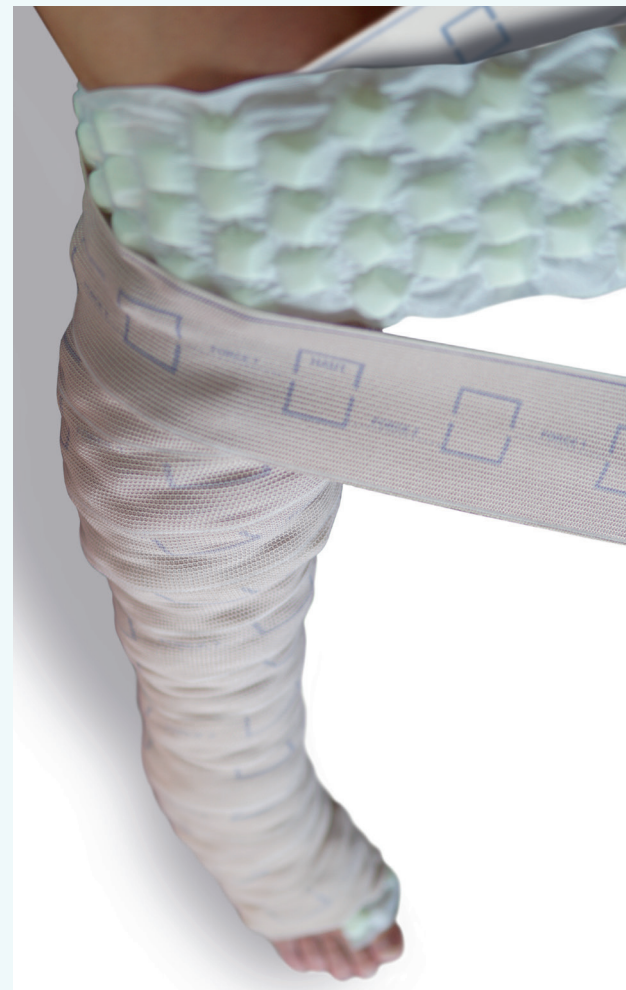

Eksempel på effektiv bandagering med flere lag og aktiv polstring i form af Mobiderm-struktur, som reducerer fibrøst væv og stimulerer reduktion af ødemet.

Mobiderm – klinisk dokumenteret effektivitet

Det aktive polstringsmateriale Mobiderm har været genstand for adskillige studier verden over – med imponerende resultater.

Studie i Indien¹

I en undersøgelse deltog 50 kvinder for at sammenligne effekten af aktivt polstringsmateriale (Mobiderm) med passivt polstringsmateriale af bomuld. Begge grupper blev behandlet i 14 dage med multilagsbandagering.

Resultat:

Gruppen, der anvendte Mobiderm, opnåede dobbelt så stor reduktion af ødem sammenlignet med bomuldsgruppen. Målingerne blev foretaget både med omkredsmålinger hver 5. cm og med volumetri (vandforskydning).

Studie i Malaysia²

Ni patienter med venøse bensår deltog i en 12-ugers undersøgelse, hvor de blev behandlet med multilagsbandagering og aktivt polstringsmateriale.

Resultat:


Efter 12 uger viste alle patienter markant reduktion i både sårstørrelse og omkredsen af læggen. Der blev ikke rapporteret nogen bivirkninger i forbindelse med behandlingen.

Konklusion:

Studierne viser, at ved brug af aktivt polstringsmateriale som Mobiderm i behandlingen af venøse bensår, opnås bedre og hurtigere helingsresultater.



Den uregelmæssige kubestruktur skaber en række trykforskelle, hvilket stimulerer og aktiverer ødemreduktion. Dette er blevet påvist i flere studier.

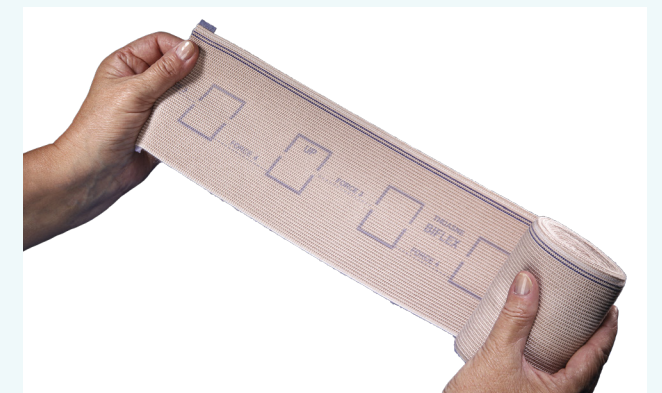

Bilfex har et integreret kontrolsystem. Når rektanglerne strækkes ud til ligesidede kuber, er den korrekte kompression påført. Derudover viser linjer, hvor bandagen skal overlappe ved bandagering.



BiFlex Light 16+
Produkt nr. 160002



Bilfex Light 16+ Pratic
– med løkke der gør bandageringen lettere
Produkt nr. 160003



BiFlex Strong 17+
Produkt nr. 170002



Bilfex Strong 17+ Pratic
– med løkke der gør bandageringen lettere
Produkt nr. 170003

¹ Mobility – safety and efficacy of Mobiderm-bandage in the management of Lymphedema publicerad i Lymphatic research and Biololgy 2023

² Efficacy of Mobiderm® Bandage in Compression Therapy for Venous Ulcers: A Prospective Case Series publicerad i The International Journal of Lower Extremity Wounds 1-8

BIFLEX SELF ADJUST



Justering af trykket – et integreret system

Kompressionstrykket kan justeres via et integreret system. Det sikrer et korrekt trykniveau på din krop – mellem 20-40 mmHG (ben) og 20-30 mmHg (arm).

L Lav = 20 mmHg, vises med den lyseblå streg
M Medium = 30 mmHg, vises med den blå streg
H Høj = 40 mmHg, vises med den mørkeblå streg

Systemet er helt integreret i produktet og kræver derfor ikke ekstra tilbehør. Når båndene strammes til, viser den integrerede indikator hvilket kompressionstryk der påføres.

Materialet er latexfrit og åndbart, herved transporteres fugten væk fra din krop. Det gennemtænkte design gør, at Biflex Self Adjust bandagen dækker hele området og forhindrer ødemer ved manglende overlap. Kompressionsprodukterne er alle enkle at tage på og af.

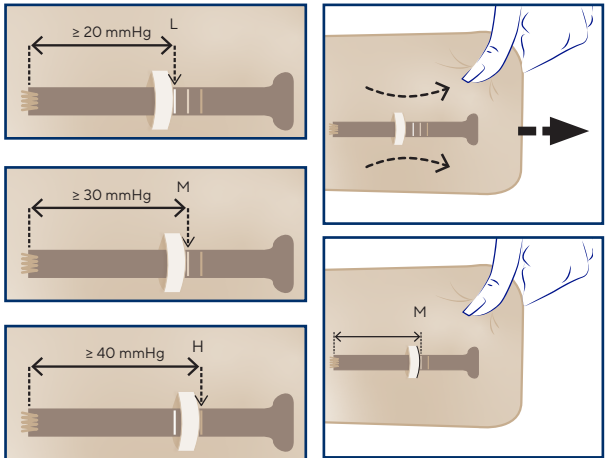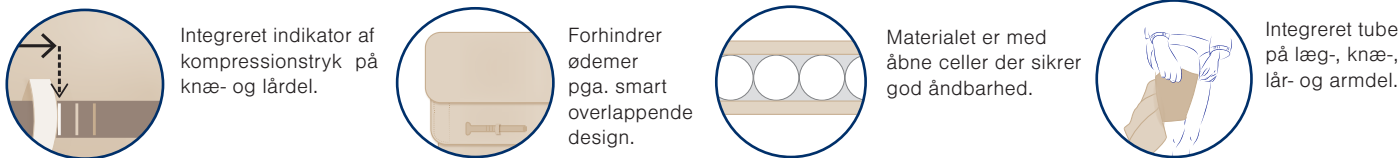

BIFLEX Self Adjust
Justerbar læg-del

cD

Omfang under knæ

cC


Omfang læg

cB

Omfang ankel

		Omfangsmål		
		cB	cC	cD
	1	16 - 24	24 - 35	25 - 36
	2	20 - 28	32 - 43	32 - 43
	3	24 - 32	40 - 51	39 - 50
	4	28 - 36	48 - 59	46 - 57
ℓ B-D Normal		< 36		
ℓ B-D Lang		> 36		

BIFLEX Self Adjust
Justerbar knæ-del

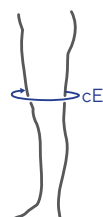


cE

Omfang over knæ

Omfangsmål	
cE	
1	35 - 50
2	50 - 65
3	65 - 85

BIFLEX Self Adjust
Justerbar lår-del

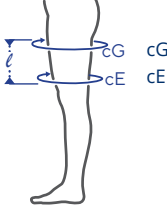		Omfangsmål		
		cE	cG	
	cG Omfang lår	1	34 - 45	46 - 57
	cE Omfang over knæ	2	41 - 53	53 - 65
		3	49 - 60	61 - 72
		4	56 - 68	68 - 80
ℓ E-G Normal				< 36
ℓ E-G Lang				> 36

Alle mål er angivet i cm.

BIFLEX Self Adjust
Justerbar fod-del

Diagram illustrating the measurement points for shoe width:

- cB: Omfang ankel (Ankle circumference)
- cH: Omfang mellemfod (Midfoot circumference)

		Omfangsmål	
		cB	cH
	1	< 36	19 - 24
	2	< 36	24 - 29
	3	< 41	29 - 34

Kvalitet du kan stole på

Leverandøren af Mobiderm, Thusane, har fuld kontrol over hele produktionsprocessen og garanterer, at deres materialer er fri for ulovlige stoffer og substanser. Det er din sikkerhed for et produkt, der lever op til de højeste standarder. Virksomheden har over 180 års erfaring med elastiske og komprimerende bandager.

Effektiv behandling med dokumenteret effekt

Studier viser, at du kan opnå hurtigere reduktion af ødem ved at anvende Mobiderm-struktur i en multilagsbandagering – sammenlignet med traditionelt polstringsmateriale. Det betyder både tidsbesparelse og økonomisk fordel, uden at gå på kompromis med resultatet.

Alt samlet i ét kit

Prøv de komplette behandlingskits til arm eller ben. Hvert kit indeholder:

- Bomuldsbind
- Mobiderm-bandage
- Elastiske kompressionsbandager med integrerede guider, der viser hvor stramt og hvor meget du skal overlape – for korrekt kompression hver gang.

Komplette kits til multilagsbandagering af arm og ben



Art. nr. 37009029999902
Bandageringskit til ben

Indhold:

- 1 stk. Biflex 16+ bandage, 10 cm x 3 m
- 1 stk. Biflex 16+ bandage, 10 cm x 5 m
- 1 stk. Biplast bandage, 3 cm x 2,5 m
- 2 stk. kortstræks bomuldsbandager, 11 cm x 4 m
- 3 stk. Mobiderm bandager, 10 cm x 3 m
- 2 stk. Biflexideal bandager, 10 cm x 5 m

Art. nr. 37009029999901
Bandageringskit til arm

Indhold:

- 1 stk. Biflex 16+ bandage, 8 cm x 5 m
- 1 stk. Biplast bandage, 3 cm x 2,5 m
- 1 stk. kortstræks bomuldsbandage, 11 cm x 4 m
- 2 stk. Mobiderm bandager, 10 cm x 3 m
- 1 stk. Biflexideal bandage, 10 cm x 5 m



THUASNE

MOBIDERM

Aktiverer og stimulerer
lymfødemet i løbet af natten

Sahva Ottobock Care er en sundhedsvirksomhed med fagligt dygtige specialister i kroppens bevægelighed. Sahva har mere end 30 klinikker fordelt over hele landet, og vi hjælper dig til et liv i bevægelse med hjælpemidler af højeste kvalitet og til dit behov.

Vi er Danmarks største udbyder af kropsbårne hjælpemidler og har mere end 150 års erfaring. Vi vejleder og deler vores viden med professionelle og kunder gennem et stort udbud af aktiviteter.

Følg os på:



sahva
ottobock.care

Sahva A/S
Nykær 68
2605 Brøndby

Tlf. 7011 0711
sahva.dk